

## ファジトロン5 開封後の確認

安全に使用して頂くため新品開封後は、必ず行ってください。

①キャップを開ける。

中からベンチュリー管、スプリングを出す。



②ステム部がしっかり押し込まれていることを確認する。



③ベンチュリー先オーリングがついている事を確認。


スプリングが有無を確認。



④ダイヤフラムのふちへ潤滑油塗布



⑤ベンチュリー管 + スプリングをファジトロンハウジングへ差し込む。

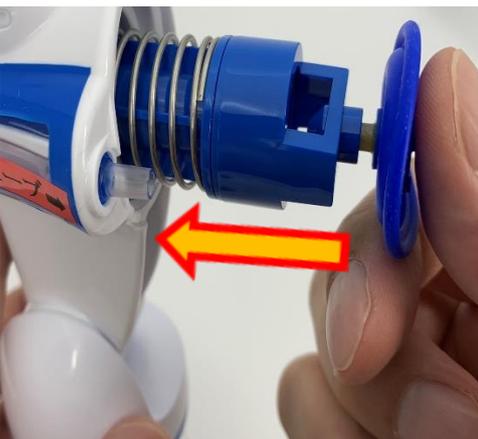

⑥キャップがロックするとこまで回して閉める。



⑦ファジトロンハウジングとネブライザを写真と同じように動かす。



⑧ファジトロンハウジングとネブライザが分かれる。



⑨接続部分にオーリングが付いている事を確認する。



⑩ネブライザキャップからネブライザボウルをはずす。



⑪噴霧パツフルのゆるみの確認。


ゆるみを感じたら親指で下へ押し込む。



⑫ネブライザキャップへネブライザボウルを装着。



連結チューブ  
接続箇所

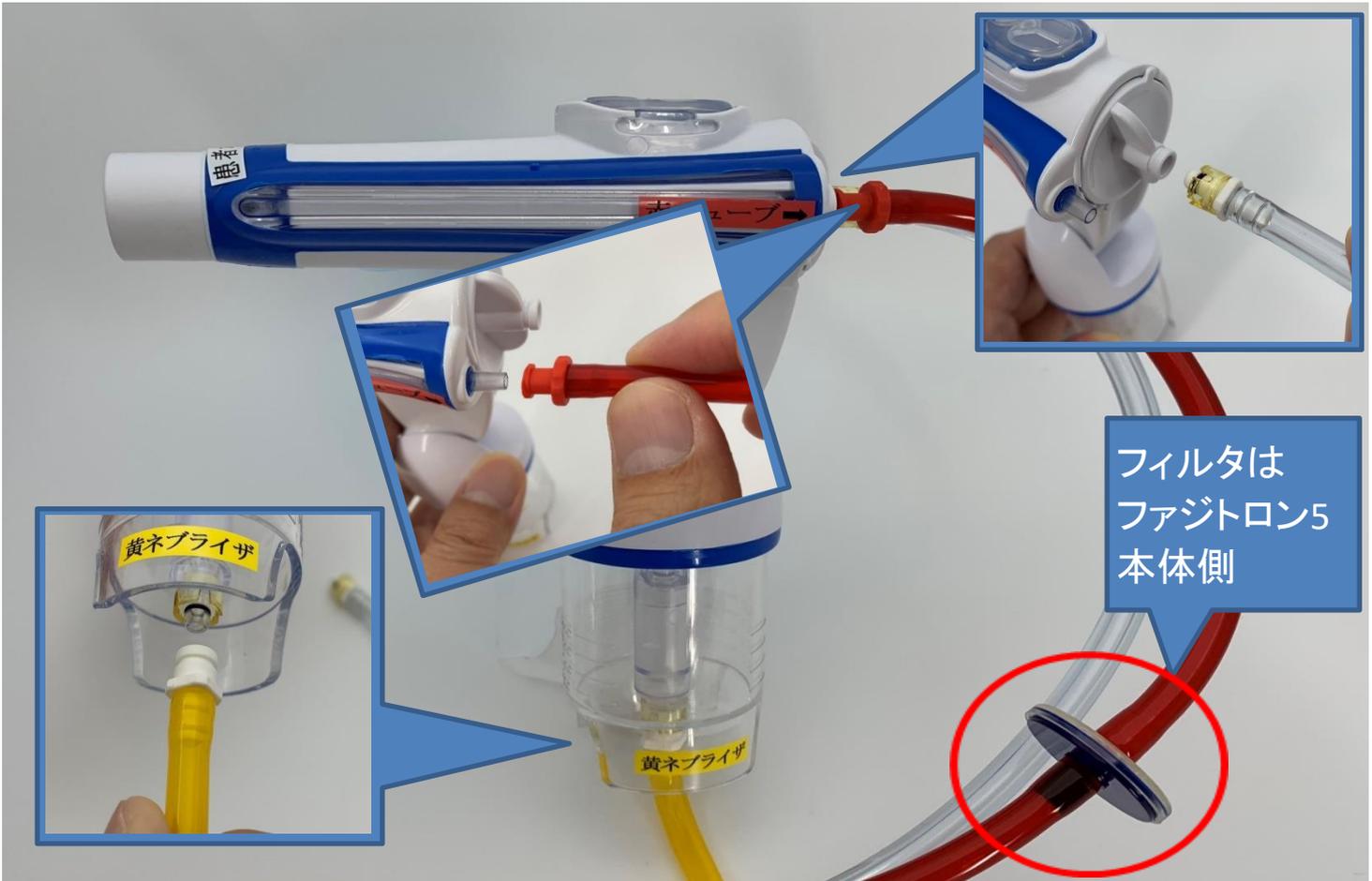

フィルタは  
ファジトロン5  
本体側

# ファジトロン5 開封後の確認 付属シール貼り付け箇所

安全に使用して頂くため新品開封後は、必ず行ってください。

貼り付け箇所を確認し、正確に貼り付けてください。



## ファジロン5 使用して頂くための注意事項。

ネブライザーボウル下、黄色チューブの抜き差しは、やさしく・真っすぐ扱ってください。

①定期的に付属の潤滑油をネブライザーボウル下 O-リングへ塗布してください。



②ネブライザーボウル下の黄色いチューブの抜き差しは、やさしく・真っすぐ行ってください。

\* 付属シールを写真と同じ位置に貼ってください。

